



EP-2100

ORTA KULAK HAVALANDIRMA AYGITI KULLANIM KILAVUZU



KULLANIM ENDİKASYONLARI

EarPopper negatif orta kulak basıncının tedavisinde kullanılmaktadır.

Negatif orta kulak basıncı orta kulakta sıvı birikmesi, işitme zorluğu ve işitme kaybına neden olabilir. EarPopper burun ve Östaki borusu aracılığı ile orta kulağa hava verilerek orta kulağın havalandırılmasına yönelik bir yöntem sağlamaktadır. Orta kulak basıncının dengelenmesi sıvı birikmesini engelleyebilir ve işitme kaybını önleyebilir.

UYARILAR

DİKKAT: KULLANIMDAN ÖNCE PROFESYONEL BİR SAĞLIK ÇALIŞANINA DANIŞILMASI GEREKİR.

- Aleti geniz boşluğuna doğru itmeyin.
- Uyum sağlamak amacıyla, EarPopper ilk kez tavsiye edilirken, doktorun aygıtın düzgün kullanımını göstermesi gerekir.
- Temiz, sağlam bir burunluk olmadan EarPopper'ı kullanmayın.
- Bu ürün kullanılırken, yetişkin denetimi gereklidir.

Kontrendikasyonlar

Aygıtı evde kullanacak hastaların şiddetli kulak enfeksiyonu, üst solunum yolu enfeksiyonu, ağır geniz tıkanıklığı veya soğuk algınlığı semptomları bulunması halinde, EarPopper'ı sağlık çalışanlarına danışmadan kullanmaması hususunda uyarılması gerekir.

EARPOPPER'IN PARÇALARI



Çıkarılabilir Burunluk

Güç Düğmesi

Tedavi Seçim Düğmesi (Arka Taraf)

Pil Bölmesi Kapağı

KULLANIM TALİMATLARI

1. Temiz bir burunluk takın. Şekil 1'e bakınız.



Şekil 1

2. EarPopper'ın burunluk bölümünü bir burun deliğine doğru sıkıca tutun. Diğer elin işaret parmağını kullanarak diğer burun deliğini kapalı tutun. Burun deliğinin iyi bir şekilde kapanması çok önemlidir. Hava akışını başlatmak için güç düğmesine basın ve aygıt çalışırken ağız kapalı şekilde yutkununuz.

Not:

- İşlemden önce ağızda az miktarda sıvı tutulması yutkunmaya yardımcı olacaktır.
- Tedavi yalnızca yutkunma sırasında gerçekleşir.

Şekil 3'e bakınız.



Şekil 3

Hastanın kulağında herhangi bir değişiklik hissetmemesi durumunda, işlemi tekrar edin, EarPopper'ın burun deliğine sıkı bir şekilde yerleştirildiğinden ve hastanın ağız kapalıyken yutkunduğundan emin olun.

4. İşlemi diğer burun deliğinde de tekrar edin.

5. Beş dakika bekleyin ve 3-4 no'lu adımları tekrar edin. Bu işlem bir tedaviyi tamamlayacaktır.

TEDAVİ ÖNERİLERİ:

- Kulak zarının arkasındaki sıvı (Sıvı birikimi ile birlikte orta kulak iltihabı) için, 7-11 hafta veya işitme normale dönene kadar günde iki kez kullanın.
- Diğer negatif kulak basıncı sorunları için gerektiğinde kullanın.

Tedavi Önerileri klinik çalışmalara dayalı kılavuz ilkelerdir. Herhangi bir tedaviye başlamadan önce, profesyonel bir sağlık çalışanına danışın.

BAKIM, TEMİZLİK & SAKLAMA

Periyodik temizlik için burunluğunu çıkarın. Sabun ve ılık su ile temizleyin. Temizlikten sonra, ılık su ile durulayın ve kullanımdan önce tamamen kurumasını sağlayın. Temizlik esnasında valfin burunluktan çıkması halinde, valfi tekrar yerleştirin.

Şekil 4'e bakınız.



Şekil 4

TEMİZLİK: Aygıtın dış tarafı yumuşak, nemli bir bezle silinmek sureti ile temizlenebilir. OTOKLAV VEYA AŞINDIRICI TEMİZLİK MADDELERİ VEYA KİMYASALLAR YADA DEZENFEKTANLARI KULLANMAYIN VE EARPOPPER AYGITINI HİÇBİR SIVIYA DALDIRMAYIN.

SAKLAMA: EarPopper'ı oda sıcaklığında temiz, kuru bir yerde saklayın ve zarar görmesi veya kirlenmesini önlemek üzere temiz bir burunluğun takılı olmasını sağlayın.

Uzun süreli saklama (6 ay veya daha fazla) durumunda, pili çıkarın.

PİLİN DEĞİŞTİRİLMESİ:

Pilin bitip bitmediğini kontrol etmek için aşağıdaki adımları izleyin:

1. Aygıtı yüksek ayara (II) getirin.
2. Parmağınızı burunluğun ucundaki deliğe yerleştirin.
3. Aygıtı çalıştırmak için Güç Düğmesine basın.
4. Motorun aralıklı olarak çalışması veya durması halinde pili değiştirin.

Aygıtın arka tarafında bulunan boşluğa parmağınızla bastırarak pil bölmesini açın, daha sonra, pil bölmesi kapağını ileri ittirin ve çıkarın. 4 yeni AAA pil yerleştirin. Aygıtın ön tarafında bulunan tırnağa bastırarak kapağı yerleştirin ve daha sonra diğer kapağı yerleştirin. Şekil 5'e bakınız.



Şekil 5

AYGITIN İMHA EDİLMESİ

Aygıt ve pilin imha işlemleri ulusal veya yerel düzenlemelere göre gerçekleştirilir. Kurşun, kadmiyum, cıva veya bromit alev geciktirici ihtiva etmemektedir.

GARANTİ

Bu aygıt normal kullanım altında satın alma tarihinden itibaren bir yıl boyunca imalat hatalarına karşı garantilidir. Bu garanti kaza veya hatalı kullanımdan kaynaklanan ürün hasarını kapsamamaktadır.

MÜŞTERİ HİZMETLERİ

EarPopper'ın çalıştırılması ile ilgili sorular için veya aksesuarlar ile yedek parçaların sipariş verilmesi amacı ile www.bilarmed.com adresini ziyaret edin veya bu kılavuzun arka tarafından bulunan iletişim bilgilerini kullanarak telefon edin veya yazın.