

Uçak yolculuğunda ya da hızlı asansörde rahatsız edici kulak basıncının — özellikle soğuk algınlığı ya da alerji ile birleştiğinde ne kadar sorun yarattığını herkes bilir. Kulak zarına uygulanan basınç, giderilmediği takdirde ağrı verebilir, işitme kaybına neden olabilir ve uzun vadeli sorunlara yol açabilir.



EarPopper, aşağıdakilerin neden olduğu kulak sorunlarını tedavi eder:



- Uçak Yolculuğu
- Aygıtlı dalış (scuba)
- Alerjiler
- Soğuk algınlıkları
- Ve diğerleri

EarPopper sorunu kaynağında — Östaki Borusunda — tedavi eder

Östaki Borusu (ÖB), kulak zarının arkasındaki (Orta Kulaktaki) boşluğu havalandırmak ve basıncı eşitlemek için vücudun kullandığı tek mekanizmadır. ÖB normalde yutkunduğunuzda ya da esnediğinizde açılır. Normal çalışan bir ÖB, orta kulağın havalandırılmasını sağlar ve basıncı eşitler.

ÖB normal çalışmadığında orta kulak kapanır, kulak zarına rahatsız edici bir basınç uygulanmasına neden olan dengelenmemiş bir boşluk oluşur ve işitme duyunuz etkilenir. Bu kapalı boşluk gerektiği gibi boşalamaz ve sonuçta kulak zarının arkasında sıvı birikir.

EarPopper, burun boşluğuna güvenli bir şekilde sabit hava akışı sağlayarak orta kulaktaki basıncı dengeler. Yutkunma anında hava Östaki Borusunu ve orta kulağı açarak, negatif kulak basıncını giderir ve sıvı varsa boşalmasına olanak tanır.

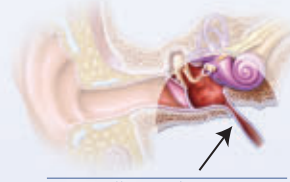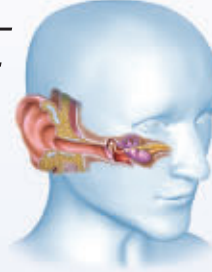

AÇIK ÖSTAKİ BORUSU



TIKANIK ÖSTAKİ BORUSU



EarPopper'in kullanımı: Yutkunmak kadar hızlı!

1

Burunluğu sızdırmaz bir şekilde burun deliğinize sıkıca dayayınız! Diğer burun deliğini kapatınız.

2

Hava akışını başlatmak için düğmeye basıp, aygıt çalışırken yutkununuz.

3

Diğer burun deliğinde tekrarlayınız. 5 dakika sonra 1.-3. adımları tekrarlayınız. Bir adet tedavi bu işlemlerle tamamlanır.

EarPopper — ilaca ve kulak borusu ameliyatına *alternatif*



Hakkımızda iyi şeyler duyuyoruz...



"Anında elde edilen sonuçlar beni o kadar hayrete düşürdü ki hemen bir tane almak istedim. Yaşam kalitemi bir hayli yükselten bu ürün için size son derece minnettirim."

— Eric G.

"EarPopper'i soluma aygıtıyla dalış yapmadan önce kullandım — derine inerken hiçbir sorun olmadı. Başımda basınç birikmedi — dalış çok daha düzgün geçti."

— Kerri B.

"Artık inişlerdeki aşırı kulak ağrısı için endişelenmeden uçak yolculuklarında rahatlayıp keyfime bakabilirim."

— Barbara R.

"İnternet üzerindeki seçenekleri araştırdıktan sonra web sitenizi bulduk. Oğlumuzun doktoruna EarPopper'i sorduk. Oğlumuz 6 hafta sonra kontrole gittiğinde... KULAĞINDA HİÇ SIVI YOKTU"

— Abby N.

"Kullandıktan üç hafta sonra kızım kayda değer ölçüde daha iyi işitmeye başladı."

— J Kevin B.

"Östaki borularımın tıkanıklığını diğer yöntemlerden daha iyi ve ilaçsız açmaya yardım etti!!"

— Claudia B.



ABD'de EarPopper FDA onayı almış olup, sadece reçete ile satılır.



EarPopper AB'de CE tescillidir.


Micromedics

TELEFON: 651 452-1977 | FAKS: 651 452-1787

1270 EAGAN INDUSTRIAL RD | ST. PAUL, MN 55121

www.earpopper.com

©2009 Micromedics, Inc.
EarPopper, Micromedics Inc. firmasının ticari markasıdır.

M-EP-0021/ATUR AUG09



İlaç Yok!

**Kulak
Borusu
Ameliyatı
Yok!**

**Kulak Basıncını
Giderme Aygıtı**


Micromedics