



Kullanım Talimatı

1. Koruyucu karton kutuyu açın ve ürünü çıkarın.
2. İşareti izleyerek kılıfı açın ve MateRegen® Gel IU'yu steril alana yerleştirin.
3. Şırınga çubuğunu şırınga stoperine bağlayın.
4. Uçtaki başlığı şırıngadan çıkarın ve standart luer kilidi kullanarak geniş delikli steril bir uygulama kanülünü şırıngaya bağlayın.
5. İntrauterin işlem tamamlandıktan sonra, uygulama kanülünü kullanarak MateRegen® Gel IU'yu uterus boşluğuna enjekte edin. Uterus kavitesinin tamamen dolmasını sağlayın.
6. Ciddi intrauterin adezyonlar için MateRegen® Gel IU ile birlikte Foley kateter balonu gibi başka tıbbi gereçlerin kullanılacağı hastalarda, önce MateRegen® IU enjekte ederek endometriumun tamamen kaplanmasını sağlayın ve ardından standart yaklaşımla kateter balonunu yerleştirin.

Sipariş Bilgisi

Kod	Ürün Tanımı	UBB
MR00158	MateRegen® Intrauterine Adezyon Barrier Gel (5cc)	6952181200158
MR00165	MateRegen® Intrauterine Adezyon Barrier Gel (2x5cc)	6952181200165

Anne Sağlığına Önem Veriyoruz!
Saygı Duyuyoruz

BILAR MEDİKAL
bilarmed@bilarmed.com
+90 (216) 456 6699 / +90 (216) 456 7179
Faks: +90 (216) 456 2054
www.bilarmed.com

MateRegen® Gel IU


İntrauterin Adezyonlara Karşı Çapraz-Bağlı Hyaluronan Asit Jel

- ★ Adezyon ve skar oluşumunu önler
- ★ Ödem ve kanamayı azaltır
- ★ Uterus kavitesini ölü boşluk bırakmayacak şekilde kapatır
- ★ Yeni mukoza oluşumunu kolaylaştırır
- ★ Biyorezorpsiyon nedeniyle operasyon sonrası pansuman materyelini çıkarmak gerekmez

BioRegen Biomedical CO. Ltd.
Bir Sino-USA Kuruluşudur.

MateRegen® Gel IU

Yeni ve benzersiz çapraz-bağ teknolojisi

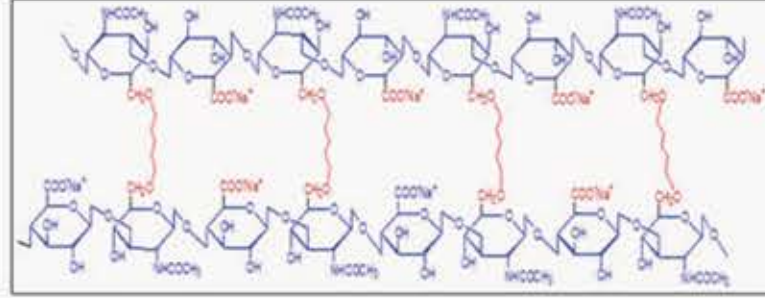

Çok sayıda fonksiyon

- Adezyon ve skar oluşumunu önler
- Ödem ve kanamayı azaltır
- Yeni mukoza oluşumunu kolaylaştırır
- Biyorezorpsiyon nedeniyle operasyon sonrası pansuman materyelini çıkarmak gerekmez
- Mukus membranlarında sekonder hasarı önler
- Uterus kavitesini ölü boşluk bırakmayacak şekilde kapatır




MateRegen® Gel IU: benzersiz özellikler



- ★ Tescilli çapraz-bağ teknolojisi: toksik ya da ksenojenik protein kalıntısı bırakmaz, mükemmel biyouyumluluk gösterir, enflamatuvar reaksiyonu azaltır.
- ★ Dokuya zarar vermeyen materyal modifikasyon yöntemi: doğal hyaluronanın biyolojik fonksiyonları korunmuştur.
- ★ Yeterli viskozite ve hidrofilik özellik: oluşturduğu nemli ortam sayesinde re-mukozalizasyonu kolaylaştırır ve implantasyon sonrası hafif hacim artışına bağlı olarak minör kanamalar önlenir.
- ★ Kontrollü yıkım profili: mukus dokusunun rejenere olduğu kritik dönemde fiziksel bir bariyer sağlayarak adezyon ve skar oluşumunu önler.
- ★ Terminal sterilizasyon: uygulama sonrası maksimum güvenlik.
- ★ Çözünür: rejenere olmuş dokularda sekonder hasarı önler.
- ★ Kolay kullanım: karıştırma gerekmez, esnek uygulama kanülü ile pratik uygulama sağlar.

Jelin optimum ve kontrollü yıkımı, endometriumun tamamen örtülmesini ve korunmasını sağlar.

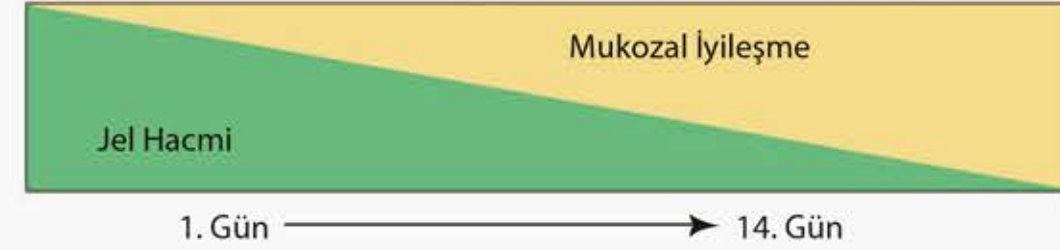


MateRegen® Gel IU 14 gün içinde yıkıma uğrayarak, uterus boşluğundan temizlenir.

- ★ Kritik iyileşme döneminde mukus membranı örter.
- ★ Enflamatuvar reaksiyon süreciyle uyumludur

1. Salamonsen LA: Tissue injury and repair in the female human reproductive tract. Reproduction 125:301-311, 2003.

MateRegen® Gel IU'in kanıtlanmış etkinliği

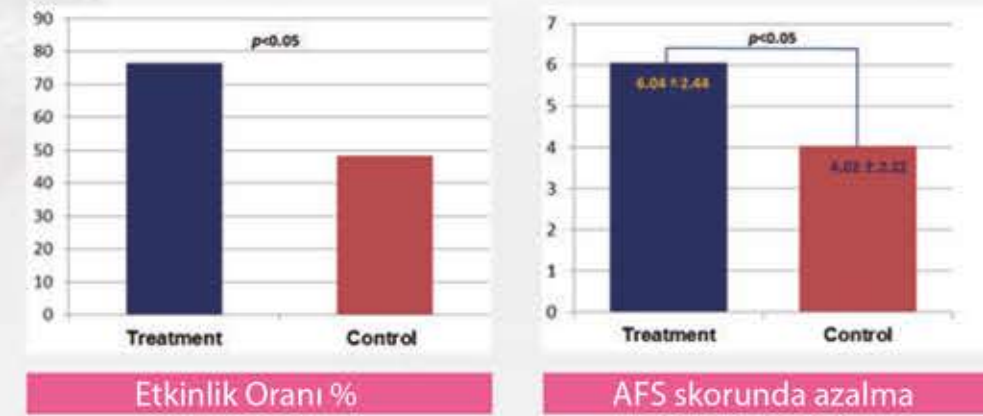

- ★ Randomize, prospektif, kontrollü, çok merkezli klinik çalışmalarda (I. Düzey) MateRegen® IU'in adezyon sayısını anlamlı ölçüde azalttığı, adezyonların şiddetini önemli ölçüde hafiflettiği ve menapoz paterninde iyileşme sağladığı bulunmuştur.
- ★ Düşük, miyom rezeksiyonu ve diğer intrauterin işlemler sonrasında da MateRegen® IU kullanılmıştır. MateRegen® IU'in postoperatif intrauterin adezyonları anlamlı ölçüde azaltabildiği kanıtlanmıştır.